

COMBIHESIVE® INVISICLOSE™ 2S

Predstavljamo

Combihesive® 2S; Vrečka na izpust z InvisiClose™
upogljivim zapiralom

VEČJA VARNOST



DVOJNO ZAPIRANJE



LAŽJE PRAZNJENJE




ConvaTec



InvisiClose™ sistem zapiranja vrečke sestavljajo:

- *varnostni zaklop (A)*
- *zapirali (B)*
- *upogljivo zapiralo repa vrečke (C)*

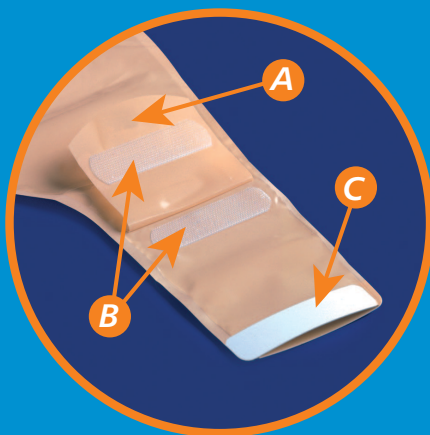

Katere so poglobitne prednosti in značilnosti Combihesive® 2S; Vrečke na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom?

- *zapirali omogočata varno zapiranje izpusta vrečke brez uporabe zapiralne sponke*
- *varnostni zaklop zagotavlja dodatno varnost*
- *napreden sistem filtriranja plinov učinkovito preprečuje napihovanje oziroma zlepljanje vrečke*
- *upogljivo zapiralo omogoča lažje praznjenje in/ali čiščenje vrečke*



ZAPIRANJE VREČKE

- Varnostni zaklop držite pred vrečko tako, da razkrijete zapirali. (1)
- Rep vrečke štirikrat prepognite v smeri proti sebi in se prepričajte, da se zapirali prekrivata. (2)
- Zapirali stisnite skupaj dokler se ne zaskočita (KLIK) po vsej dolžini. (3)
- Varnostni zaklop prepognite proti hrbtni strani vrečke (stran proti telesu) in stisnite zapirali, da začutite, da sta se zaskočili (KLIK). (4)



PRAZNIJENJE VREČKE

Hrbtno stran vrečke (stran proti telesu) obrnite proti sebi. Previdno dvignite varnostni zaklop, da se odpre. (5)

Varnostni zaklop držite pred vrečko, z dvigom robov odprite zapirali in štirikrat odvijte prepognjen rep vrečke. (6)

Za lažje praznjenje in/ali čiščenje lahko odprete rep vrečke tako, da s palcem in kazalcem stisnete upogljivo zapiralo repa. (7)



PODATKI ZA NAROČANJE

Paleta Combihesive® 2S;

Vrečk na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom

<i>Kataloška številka</i>	<i>Ime izdelka</i>	<i>Velikost obročka</i>	<i>Pakiranje</i>
411385	<i>Vrečka na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom, kožne barve</i>	<i>38 mm</i>	<i>10 kom.</i>
411386	<i>Vrečka na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom, kožne barve</i>	<i>45 mm</i>	<i>10 kom.</i>
411387	<i>Vrečka na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom, kožne barve</i>	<i>57 mm</i>	<i>10 kom.</i>
411388	<i>Vrečka na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom, kožne barve</i>	<i>70 mm</i>	<i>10 kom.</i>

vsm

VALENCIA
Stoma-Medical d.o.o.

Valencia Stoma-Medical d.o.o.
Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 251 49 59
Fax: (01) 251 24 90
www.vsm.si

ConvaTec

